



Benutzerhandbuch



≡ **ALPHA** ≡
Treppenlift
CE

Inhaltsverzeichnis:

Einführung.....	3
Installationsschema:.....	4
Technische Parameter:	5
Übersicht Sitzfunktionen	6
Bedienung	7
Benutzung des Liftes.....	8
Rufen und Senden des Treppenlifts	9
Drehsitz	10
Störung und Fehlersuche.....	11
Nothandrad.....	14
Laden der Batterien	15
Wartung	15
Wartungsliste.....	16

Einführung

Zunächst dürfen wir Ihnen zum Kauf eines Lehner Treppenliftes gratulieren und Sie im großen Kreis unserer zufriedenen Kunden willkommen heißen. Seit mehr als 30 Jahren sind unsere Lifte als zuverlässige Beförderungsmittel, welche sich durch individuelle Anpassung an bauliche Gegebenheiten auszeichnen, bekannt.

Der Alpha Treppenlift stellt eine neue Generation von Treppenliften mit langjährig bewährter Technik dar.

Um Zufriedenheit mit Ihrem Treppenlift über lange Zeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Betreiberhandbuch sorgfältig durch. Sie werden hier neben Anleitungen für die Bedienung des Aufzuges auch Sicherheitshinweise finden.

Nutzen Sie durch den Gebrauch dieser Anleitung die langjährige Erfahrung der Firma Lehner Lifttechnik GmbH im Betrieb von Treppenliften. Durch richtige Pflege der Anlage Ihrerseits, sowie eine planmäßige Wartung durch ein kompetentes Unternehmen, wird Ihnen über einen langen Zeitraum eine zuverlässige Liftanlage zur Verfügung stehen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke auf!

Für Pannen, die durch Missachtung dieser Anleitung oder falsche Handhabung entstehen, lehnt Lehner Lifttechnik GmbH ausdrücklich jede Haftung ab. Müssen solche Pannen von unserem Personal behoben werden, wird dies auch innerhalb der Gewährleistungszeit in Rechnung gestellt.


Bevor Sie den Lift benutzen, beachten Sie bitte folgende Anweisungen, um eine sichere und zuverlässige Benutzung des Liftes zu gewährleisten:

- Installation und Wartung nur durch offizielle Vertreterfirmen der Firma Lehner
- Nur 1 Person darf den Sessel benutzen. Diese Person muss mit den Eigenheiten der Anlage vertraut sein.
- Maximale Tragkraft 160kg
- Benützen Sie den Sicherheitsgurt während der Fahrt
- Vor der Fahrt vergewissern Sie sich, dass Sie gut auf dem Sessel sitzen und der Drehsitz in der richtigen Fahrposition ist
- Schauen Sie in die Fahrtrichtung während der Fahrt
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Lift spielen
- Der Sitz ist nicht für den Lastentransport geeignet.
- Bevor Sie den Sessel senden oder rufen, vergewissern Sie sich dass der Fahrweg frei ist
- Benützen Sie den Lift nicht im Falle eines Feuers
- Bei Nichtbenutzung versperren Sie den Lift mit dem Schlüssel und bewahren diesen an einem sicheren Ort auf!

Technische Parameter:

Anwendung	Private oder öffentliche Treppenhäuser
Traglast	160 kg
Sitzgröße	460 x 326 mm
Geschwindigkeit	0,11 m/s auf geraden Läufen 0,06 m/s in Kurven
Neigung der Schiene	0° bis 52°
Antriebssystem	Zahnstange
Bedienelemente	Totmannsteuerung - Joystick auf Armlehne und Rufstellen in den Haltestellen
Motor	0,37kW, 24 V Gleichstrom
Ladegerät Anschluss	1x230V 50Hz
Sitz hochgeklappt	37 cm
Sitz runtergeklappt	64,5 cm
Material Schiene	Stahl beschichtet
Gewährleistung	24 Monate für Teile
Temperatur zulässig	0°C bis +40°C
Batterien	2 x 12V/9Ah
Sitzhöhe über Fußbrett	496 mm

Übersicht Sitzfunktionen

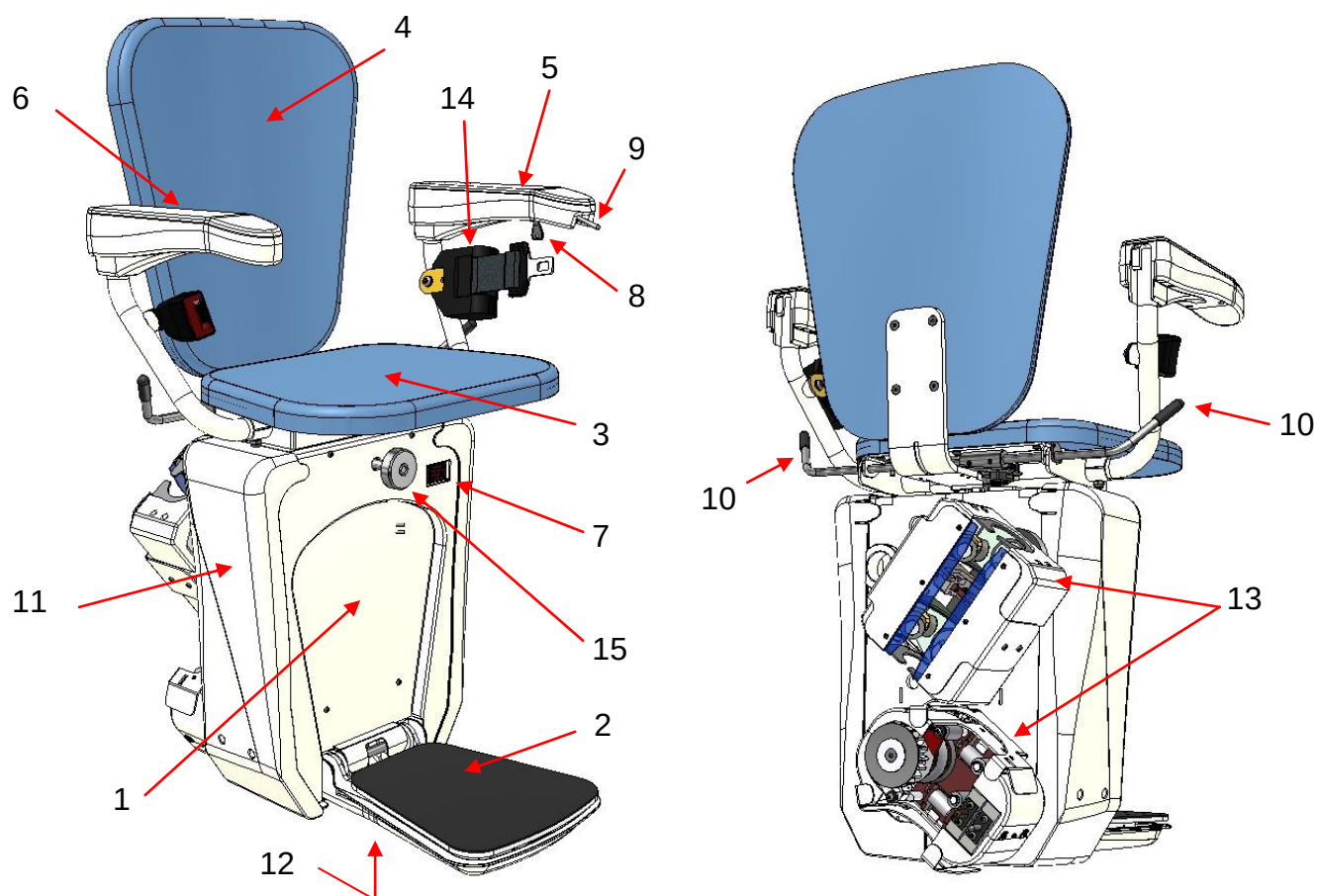


1. Vordere Abdeckung
2. Fußbrett
3. Klappsitz
4. Rückenlehne
5. Linke Armlehne
6. Rechte Armlehne
7. Hauptschalter
8. Schlüsselschalter in Armlehne

9. Joystick in der Armlehne
10. Hebel für Drehsitz
11. Seitliche Abdeckung
12. Kontaktboden
13. Abdeckung der Fahrwerke
14. Sicherheitsgurt
15. Nothandrad


Bedienung

Die Bedienung des Sessellifts erfolgt durch den Joystick in der Armlehne bzw. durch die Auf und Ab Taster der Rufstellen.

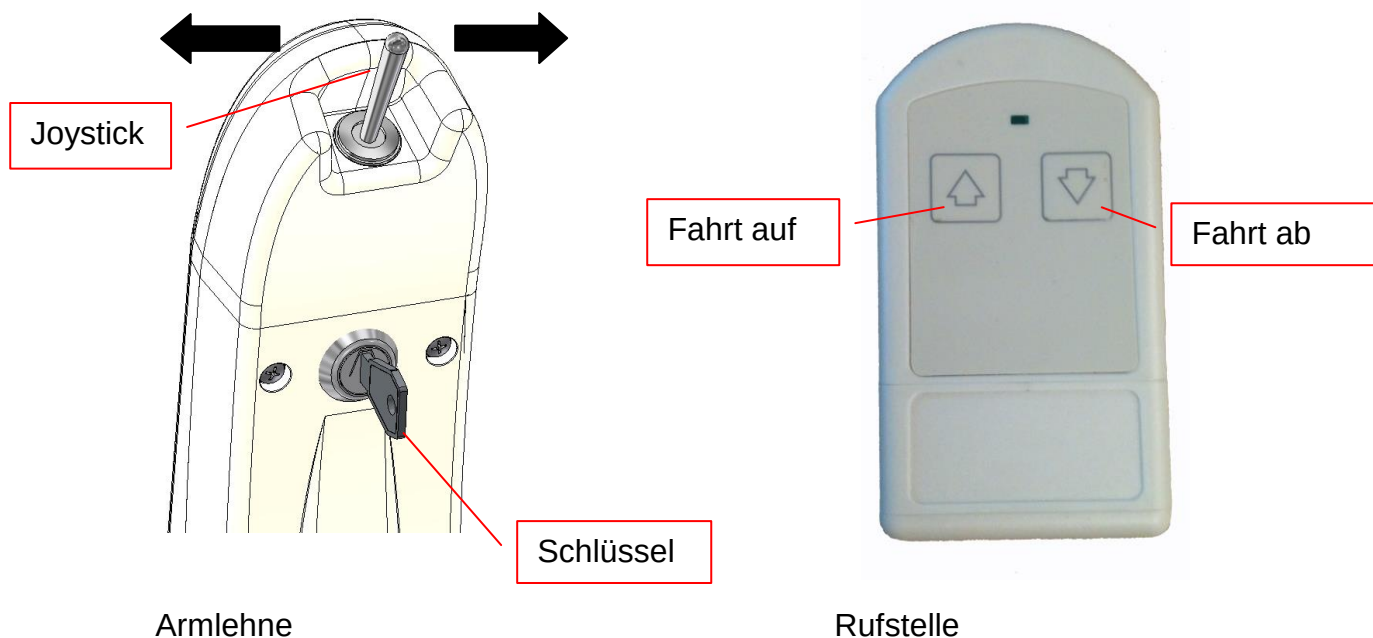


Der Schlüsselschalter in der Armlehne oder in der Rufstelle muss eingeschaltet sein, um den Sessel zu bedienen.


Benutzung des Liftes

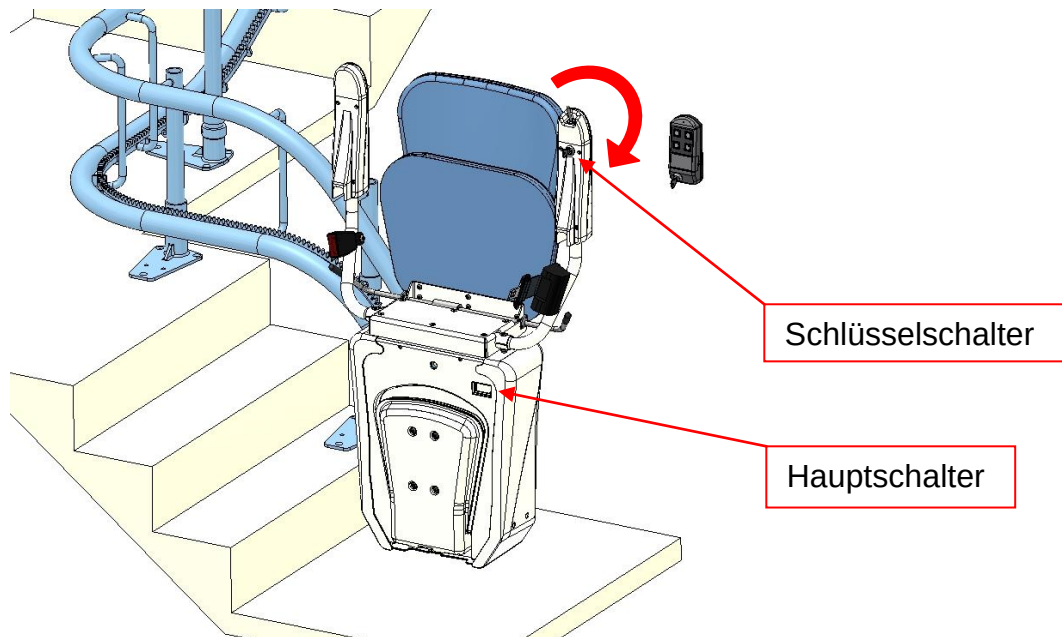

- 1) Schalten Sie den Hauptschalter und den Schlüsselschalter an der Armlehne ein.
- 2) Klappen Sie das Fußbrett sowie den Klappsitz und die Armlehnen nach unten.
- 3) Setzen Sie sich auf den Sessel mit den Füßen am Fußbrett
- 4) Drücken Sie den Joystick in die gewünschte Fahrtrichtung. Nach 2-3 Sekunden wird sich der Sessel in Bewegung setzen (Sicherheitszeitverzögerung).
- 5) Der Sessellift fährt solange der Joystick gedrückt wird und stoppt automatisch in der Haltestelle.
- 6) Bitte blicken Sie immer in die Fahrtrichtung!

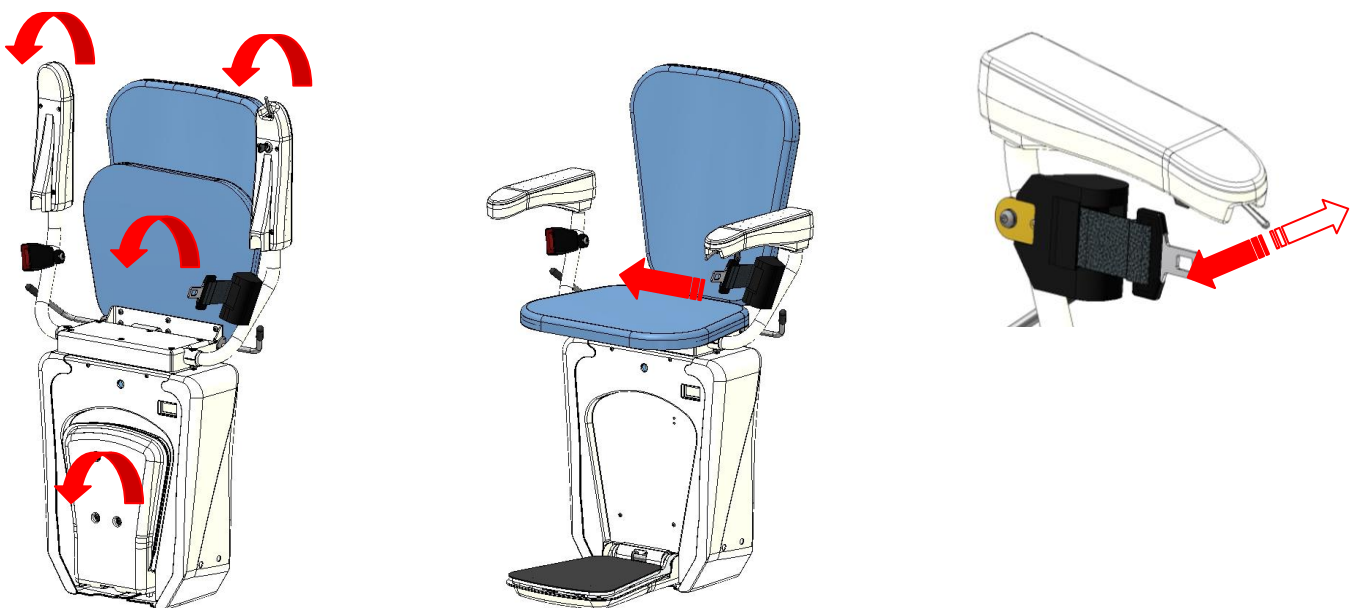

Rufen und Senden des Treppenlifts

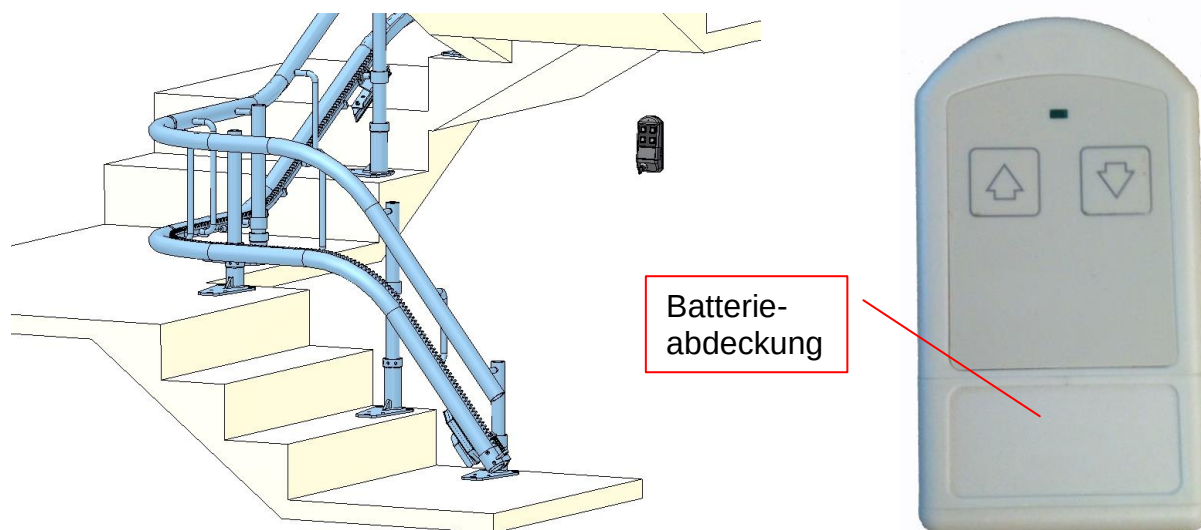


Batterie-
abdeckung

- 1) Vergewissern Sie sich dass, niemand den Lift benutzt und sich niemand auf der Treppe befindet.
- 2) Schalten Sie den Schlüsselschalter in der Rufstelle ein.
- 3) Nun können Sie den Lift mit dem Auf- oder Abtaster rufen oder senden.
- 4) Der Sessellift fährt solange der Joystick gedrückt wird und stoppt automatisch in der Haltestelle.

Rufstellen werden mit 2 Stück 1.5V AAA Batterien geliefert. Die Lebensdauer der Batterien beträgt ca. 1 Jahr. Bei der jährlichen Wartung können die Batterien getauscht werden.

Drehsitz

Auf der oberen Haltestelle kann der Sitz für das einfachere Aussteigen in verschiedene Positionen gedreht werden.

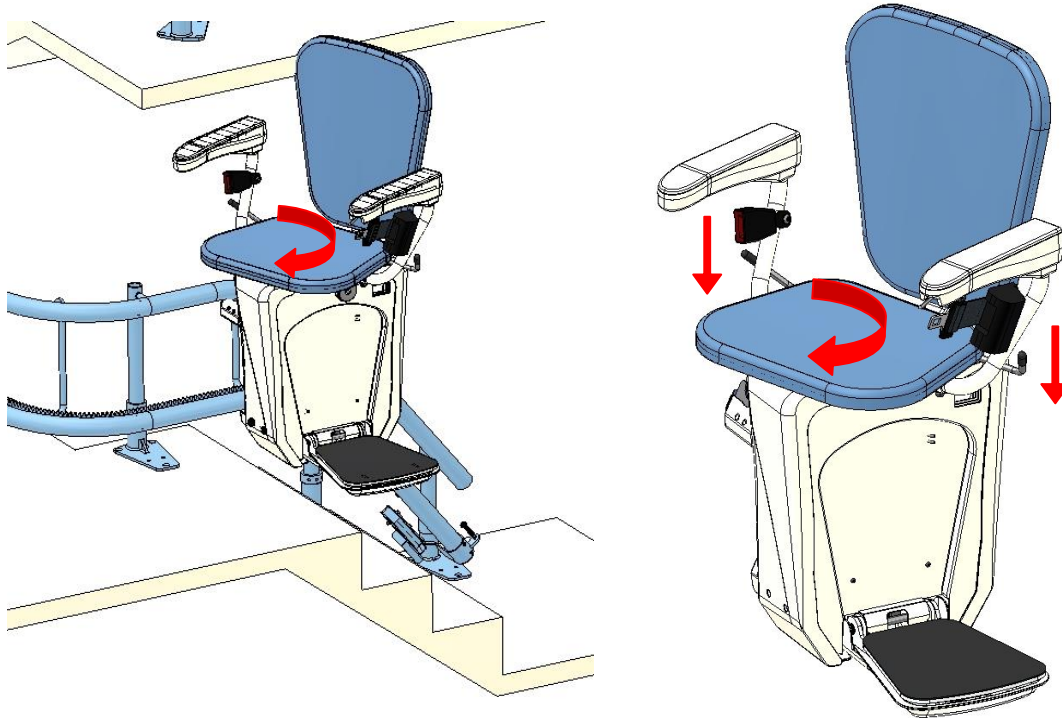


- 1) Drücken Sie den Hebel nach unten.
- 2) Drehen Sie den Sitz in Richtung des Ausstiegs
- 3) Es gibt 5 verschiedene Positionen bei 0°, 20°, 45°, 70° und 90° Drehung. Bei der gewünschten Drehung ziehen Sie den Hebel wieder nach oben und vergewissern sich, dass der Hebel in dieser Position wieder gut einrastet und den Sitz in dieser Position fixiert!
- 4) Verlassen Sie den Sessel.
- 5) Drehen Sie den Sitz zurück in die Fahrposition.
- 6) Falls gewünscht können Sie nun das Fußbrett sowie die Armlehnen hochklappen und den Lift so parken.
- 7) Ziehen Sie den Schlüssel von der Armlehne ab, um zu verhindern, dass unbefugte Personen oder Kinder den Lift benutzen.

Störung und Fehlersuche

Der Lift ist mit einer Vielzahl an elektrischen und mechanischen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Sollte der Lift nicht korrekt funktionieren, überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

Über dem Hauptschalter befinden sich 3 LEDs. Die linke und die rechte LED geben Auskunft über die Sicherheitskontaktschalter auf der Fahreinheit. Die LED in der Mitte gibt Auskunft über den Sicherheitskreis. Sind alle 3 LEDs aus, ist der Sicherheitskreis geöffnet.

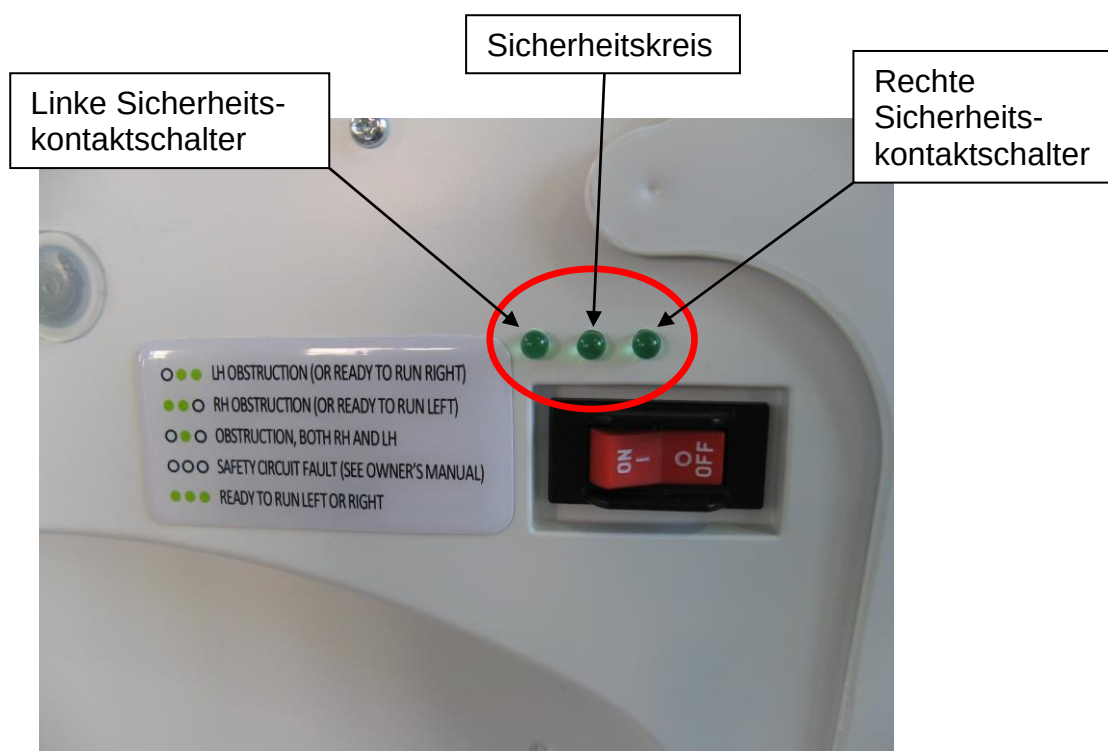

Der Sicherheitskreis besteht aus folgenden Schaltern:

- Schalter für Fangvorrichtung S10
- Drehsitzschalter SR2
- Notendschalter S22
- Schalter für Nothandrad SA5

Die richtungsabhängigen Sicherheitskontakte bestehen aus folgenden Schaltern (links/rechts):

- Oberes Fahrwerk S13/S12
- Unteres Fahrwerk S27/S28
- Seitliche Schalter am Fahrwerk SK-1/SK-2
- Fußbrett (seitlich) EK-R/EK-L
- Fußbrett und unter der Fahreinheit (druckempfindlich beim Abwärtsfahren) S17

Sollten alle 3 LEDs aus sein und **der Lift reagiert nicht auf die Rufstellen oder über den Joystick an der Armlehne, so überprüfen Sie bitte folgende Punkte:**

- Überprüfen Sie, ob alle 3 LEDs an sind. Falls nicht, ist der Sicherheitskreis unterbrochen (Drehsitzschalter, Schalter für Fangvorrichtung, Schalter für Nothandrad oder Notendschalter)
- Überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt angeschlossen ist
- Überprüfen Sie, ob der Hauptschalter eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob der Lift in der korrekten Position und nicht gedreht ist. Der Drehsitzschalter darf nicht gedrückt sein! Wenn dieser gedrückt ist, sind LED 18-23 aus.
- Überprüfen Sie, ob der Schalter für das Nothandrad nicht gedrückt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Fangvorrichtung ausgelöst wurde. Wenn ja, bitte die Installationsfirma benachrichtigen.
- Überprüfen Sie, ob der Notendschalter gedrückt wurde. Wenn ja, bitte die Installationsfirma benachrichtigen.

Der Lift reagiert nur über die Rufstellen, aber nicht über den Joystick an der Armlehne:

- Überprüfen Sie, ob die Armlehne ganz hinuntergeklappt wurde und der Schlüsselschalter in der Armlehne gedrückt wurde.

Der Lift reagiert nur über den Joystick an der Armlehne, aber nicht über die Rufstellen:

- Überprüfen Sie, ob die LED auf der Rufstelle grün blinkt. Wenn die Rufstelle orange blinkt, kann der Empfänger das Signal nicht empfangen.

Der Lift fährt nur in eine Richtung:

- Überprüfen Sie die linke und rechte LED neben dem Hauptschalter. Sollte eine der beiden LEDs aus sein, so überprüfen Sie die Sicherheitskontaktschalter an der betreffenden Seite.

Am Lift ertönt ein Biepton (alle 5 Sekunden außerhalb der Ladestation) obwohl sich dieser in der Ladeposition befindet und LED 6 aus ist:

- Überprüfen Sie, ob der Ladebolzen einen Kontakt zum Kupfer an der Ladekurve hat.
- Überprüfen Sie, ob das Ladegerät angeschlossen und keine Sicherung durchgebrannt ist.

Am Lift ertönt ein Biepton (alle 2,5 Sekunden – wenig Batteriespannung) und der Sitz befindet sich außerhalb der Ladestationen:

- Überprüfen Sie ob LED 1 an ist. Wenn nicht, weist dies auf eine niedrige Batteriespannung hin.


Wenn Sie die Installationsfirma anrufen, geben Sie bitte die Produktionsnummer bekannt (LE xxxx).

Nothandrad

Falls der Lift auf der Treppe stoppt und sich nicht weiter bewegen lässt, dann kann man diesen mit dem Nothandrad in die nächste Haltestelle oder außerhalb des Gehbereichs bewegen.

Das Handrad wird durch die vordere Plastikabdeckung eingeführt. Diese Öffnung befindet sich neben dem Hauptschalter.

Das Handrad muss mit etwas Druck in das Loch gedrückt und dann gedreht werden. Man kann den Lift auf diese Weise nur sehr langsam bewegen.

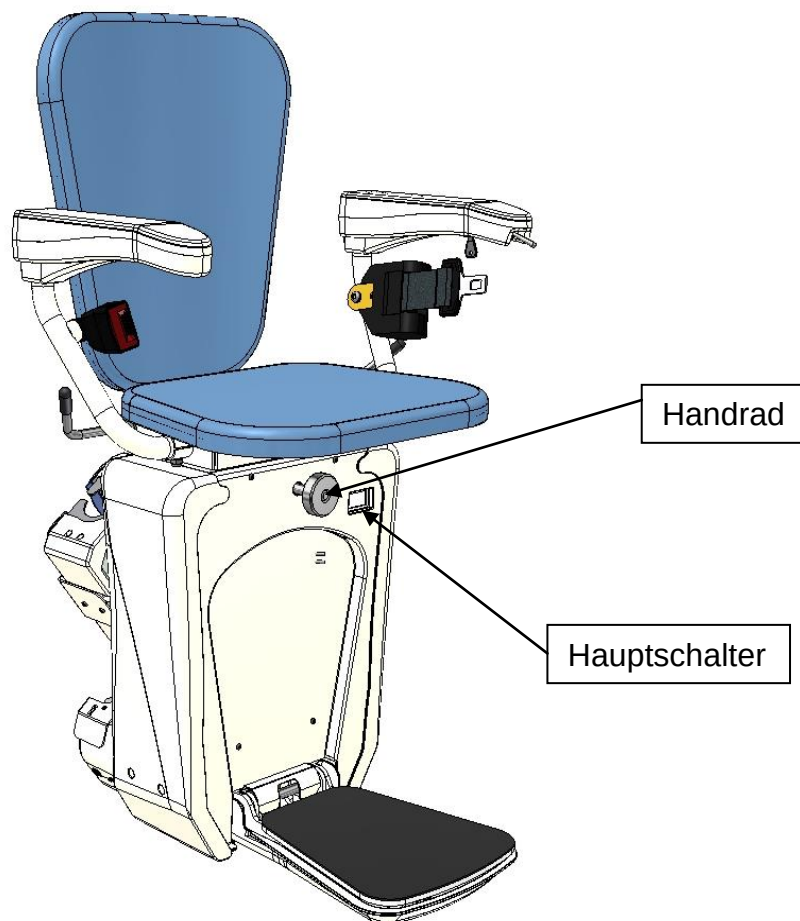

Laden der Batterien

Die beiden 12V Batterien, die den Motor antreiben, werden in jeder Haltestelle ständig geladen.

Der Sessel ist mit folgenden Audiosignalen ausgestattet:

- Wenn die Batterien nicht geladen werden, ertönt nach 5 Sekunden ein kurzer Biepton, der jede Sekunde wiederholt wird. Die Batterien werden nicht geladen, wenn sich der Lift ausserhalb der Ladestation befindet oder das Ladegerät ohne Strom ist.
- Falls die Batterie schwach ist, ertönt während der Fahrt alle 2,5 Sekunden ein Biepton. In diesem Fall parken Sie den Lift für einige Zeit in der Haltestelle, um die Batterien wieder aufzuladen.

Wartung

Regelmäßige Wartung des Treppenlifts ist besonders wichtig. Die minimalen Intervalle dafür sollten wie folgt sein:

- Erste Wartung 6 Monate nach dem Einbau des Liftes
- Danach eine jährliche Wartung alle 12 Monate

Bitte überprüfen Sie regelmäßig (1 x pro Woche) folgende Funktionen Ihres Liftes:

- Der Sessel darf nicht fahren, wenn die Armlehne nach oben geklappt ist.
- Der Sessel darf nicht fahren, wenn der Sitz nicht in Fahrposition ist (0° Drehung)
- Überprüfen Sie alle Sicherheitsabdeckungen. Diese müssen den Lift stoppen, wenn diese gegen die Fahrrichtung gedrückt werden.
- Überprüfen Sie den Lift auf visuelle Beschädigung.
- Wenn Sie den Joystick oder den Druckknopf auf der Rufstelle loslassen, muss der Lift sofort anhalten.
- Reinigen Sie regelmäßig den Lift und die Schiene

Wartungsliste

[illegible]